



N | C | G Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)

Wirkung nur bei sachgerechter Anwendung!



Vor und nach Berührung der MNB:
Hände waschen oder desinfizieren!



MNB nur an den Bändern anfassen
(auch beim Ausziehen) und sicher vor
Mund und Nase platzieren. Ggf.
Nasenbügel anpassen. Auf dichten Sitz
achten.



Während des Tragens nicht ins Gesicht
fassen oder die MNB berühren.

- Die MNB muss immer Mund und Nase bedecken.
- Feuchte MNB austauschen!
- Benutze MNB in einem luftdicht verschlossenen Beutel oder Gefäß aufbewahren.
- Benutzte MNB vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60° waschen und trocknen.